

Dress-On

pansement cataplasme

DRESS'ON est un pansement vétérinaire aux multiples propriétés. Il peut être utilisé en pansement à sec, en cataplasme à chaud ou froid. Il est très utilisé lors d'abcès, seime, cloue de rue, lymphangite, molettes ou escarres.

Mode d'emploi

Nettoyer la peau.
Couper le cataplasme à la taille désirée et placer le avec le film plastique transparent vers l'extérieur (voile non tissé au contact du cheval).
Maintenir le cataplasme avec une bande cohésive, en s'assurant qu'il est bien couvert par la bande, ou le recouvrir de coton puis d'une bande cohésive.

Il est conseillé de changer le cataplasme au moins toutes les 12 heures.

N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.



Conseils d'utilisation

- En pansement sec : Appliquer le pansement à l'acide borique directement sur la peau.
- En cataplasme froid : Placer le cataplasme dans un récipient propre, face plastique vers le haut. Verser de l'eau froide (sérum physiologique ou eau préalablement bouillie puis refroidie). Lorsque le cataplasme est saturé, le retirer doucement et laisser s'écouler le liquide excédentaire (le cataplasme doit être humide, mais pas gorgé d'eau). Mouler le cataplasme autour du corps du cheval.
- En cataplasme chaud : Suivre la méthode indiquée ci-dessus avec de l'eau tiède (38°C environ).

Catégorie

Produit d'usage externe.

Précautions d'emploi

Formulé pour les équidés - Usage externe - Tenir hors de portée des enfants

Conserver dans un endroit sec - Bien refermer après usage

Présentation

Taille unique : 20 cm x 40 cm

Sous emballage individuel.

Boite de 10 unités

Ce label garantit qu'aucune substance prohibée n'a été utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage de la présence d'éventuels contaminants dopants a été effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

