

pansement cataplasme à l'acide borique

Utilisation

Eazi-Care de Foran est un pansement cataplasme à l'acide borique pour chevaux et chiens à utiliser :

En application sèche, pour son fort pouvoir absorbant (utile pour les plaies suintantes).

En application froide et humide :

- pour l'action vasoconstrictrice du froid (utile lors de saignement, de fourbure),
- pour l'effet analgésique (anti-douleur) du froid (utile lors de tendinite, d'élongation, sensibilité des pieds, pour les suros...).

En application chaude et humide :

- pour améliorer la cicatrisation et le drainage des plaies (plaie cutanée, escarre, seime, cloue de rue...),
- pour améliorer le drainage lors d'engorgement, lymphangite, molette...
- pour favoriser la maturation des abcès, notamment les abcès de pied.

En effet, la chaleur provoque une vasodilatation qui favorise l'apport en facteurs de cicatrisation (globules blancs, oxygène), et augmente la perméabilité des vaisseaux.



Mode d'emploi

Nettoyer la peau si nécessaire. Couper le pansement cataplasme à la taille désirée. Placer Eazi-Care (sec ou humide) avec le film plastique transparent vers l'extérieur (voile non tissé au contact de la peau). Maintenir le pansement avec une bande cohésive, en s'assurant que le cataplasme est bien couvert par la bande.

Changer le pansement toutes les 8 heures.

Application sèche :

Appliquer simplement directement sur la zone à couvrir.

Application froide et humide :

Tremper la pansement cataplasme dans un seau d'eau bouillie totalement refroidie. Lorsque le cataplasme est totalement saturé, le retirer doucement et laisser s'écouler le liquide excédentaire (le cataplasme doit être humide mais pas gorgé d'eau).

Au besoin, replacer la pansement humide dans son emballage et le réfrigérer.

En cataplasme chaud :

Même démarche qu'en application froide et humide, sauf que l'eau de trempage doit être à 38°C.

Catégorie

Produit d'usage externe.

Précautions d'emploi

Formulé pour les équidés - Usage externe - Tenir hors de portée des enfants

Conserver dans un endroit sec - Bien refermer après usage

Présentation

Taille unique : 20 cm x 40 cm

Sous emballage individuel.

Boîte de 10 unités

Ce label garantit qu'aucune substance prohibée n'a été utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage de la présence d'éventuels contaminants dopants a été effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

